

PROTOCOLOS SUGERIDOS UTILIZANDO VACUM LASER

FACIAL E CORPORAL

Edição 06 | Setembro/19



Autoras: Sandra Costa e Cecilia Manoel



Consultoras oficiais MMO

PROTOCOLOS FACIAIS UTILIZANDO KIT DE VENTOSAS DE VIDRO



1) Peeling Diamante (Esfoliação da pele com a associação do Vácuo) (para este procedimento é necessário adquirir o Kit com as ponteiros para peeling de diamante)

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
- Peeling Diamante: Acoplar caneta com a ponteira com a lixa de gramatura de acordo com o tipo de pele. Acionar o Vacum Laser:

Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo

Ajustar Tempo: de 05m cada meia face

Ajustar: SEM emissão de laser OFF

Ajustar: a pressão de acordo com sensibilidade da pele.

Realize movimento suaves de varredura horizontal, vertical ou circular.

- Higienizar novamente a pele e seguir com protocolo com o uso de produtos adequados à técnica de acordo com a disfunção a ser tratada e conforme orientação do fabricante do produto. (Limpeza de pele, hidratação, nutrição, clareamento, etc)
- Finalizar com FPS

2) Limpeza de Pele

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
- Emoliência,
Após Emoliência utilizar Vacum Laser para promover a extração com a ventosa de vidro 6 mm curvo,

Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo

Ajustar Tempo: ajustar conforme a necessidade

Ajustar: Laser ON

Ajustar: em 660nm

Ajustar: a pressão de acordo com sensibilidade da pele e com sucção suficiente para promover extração

Realizar movimentos de varredura nas regiões de maior oleosidades e concentrar nos comedões,

Após a extração: Drenagem de Grupos linfáticos com Vacum Laser - ventosa vidro 30 mm,

Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado

Ajustar: MP5

Ajustar Tempo: conforme a necessidade

Ajustar: Laser ON

Ajustar: em 808nm

Ajustar: em pressão de até -60mbar

Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.

- Em seguida: Aplicar o Vacum Laser ventosa de vidro 30 mm

Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado

Ajustar: MP9

Ajustar Tempo: conforme a necessidade

Ajustar: Laser ON

Ajustar: em 660/808nm

Ajustar: em pressão de -90 a -150mbar

- Promover movimentos de varredura no sentido do sistema linfático. Para esta etapa utilizar produto para deslizamento da ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)

Seguir o protocolo com o uso de produtos adequados à técnica de Limpeza de Pele conforme orientação do fabricante do produto.

Observação Importante: É imprescindível o uso de óculos de proteção profissional e cliente para devida proteção durante a emissão de laser;

3) Acne

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
Drenagem de Grupos linfáticos com Vacum Laser - ventosa vidro 30 mm,
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP5
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 808nm
Ajustar: em pressão de até -60mbar
Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.
- Aplicar produto específico à disfunção tratada;
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP5
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 808nm
Ajustar: em pressão de até -60mbar
- Em seguida: Aplicar o Vacum Laser ventosa de vidro 30 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP9
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão de -60 até -150 mbar
- Promover movimentos de varredura no sentido do sistema linfático. Para esta etapa utilizar produto para deslizamento da ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)
- Para as áreas com muita inflamação seguir com o Vacum Laser e ventosa de vidro 30mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP9
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão 0 (zero)
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento de acne conforme orientação do fabricante do produto.

4) Revitalização

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
Drenagem de Grupos linfáticos com Vacum Laser - ventosa vidro 30 mm,
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP5
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON

Ajustar: em 808nm

Ajustar: em pressão de até -60mbar

Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.

- Aplicar produto específico a disfunção tratada;
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa de vidro 30 mm

Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado

Ajustar: MP5 ou MP6

Ajustar Tempo: de 5 a 10 minutos Hemiface

Ajustar: Laser ON

Ajustar: em 660/808nm

Ajustar: em pressão de -90 até -150 mbar

Promover movimentos de varredura no sentido do sistema linfático. Para esta etapa utilizar produto para deslizamento da ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)

- Seguir com protocolo com o uso de produtos adequados à técnica de Revitalização conforme orientação do fabricante do produto.

5) Lifting Facial

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
Drenagem de Grupos linfáticos com Vacum Laser - ventosa vidro 30 mm,
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado

Ajustar: MP5

Ajustar Tempo: conforme a necessidade

Ajustar: Laser ON

Ajustar: em 808nm

Ajustar: em pressão de até -60mbar

Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.

- Aplicar produto específico à disfunção tratada;
- Aplicar Vacum Laser com ventosa de vidro 30 mm;

Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado

Ajustar: MP4 ou MP5

Ajustar Tempo: de 5 a 10 minutos Hemiface

Ajustar: Laser ON

Ajustar: em 660/808nm

Ajustar: em pressão de -90 até -150 mbar

Promover movimentos de varredura no sentido das fibras musculares, tracionando a pele para cima. Para esta etapa utilizar produto para deslizamento da ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)

- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de Lifting Facial conforme orientação do fabricante do produto.

6) Lifting Facial Imediato

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
Drenagem de Grupos linfáticos com Vacum Laser - ventosa vidro 30 mm,
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado

Ajustar: MP5

Ajustar Tempo: conforme a necessidade

Ajustar: Laser ON

Ajustar: em 808nm

Ajustar: em pressão de até -60mbar

Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.

- Aplicar produto específico à disfunção tratada;
- Aplicar o Vacuum Laser com ventosa de vidro 30 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP3 ou MP4
Ajustar Tempo: de 5 a 10 minutos Hemiface
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão de -90 até -180 mbar

Promover movimentos de varredura no sentido das fibras musculares, tracionando a pele para cima. Para esta etapa utilizar produto para deslizamento da ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)

- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de Lifting Imediato conforme orientação do fabricante do produto.

7) Lifting de papada

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produto específico à disfunção tratada;
- Aplicar o Vacuum Laser com ventosa de vidro 30 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP5
Ajustar Tempo: de 5 a 10 minutos
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão de -90 até -180 mbar

Promover movimentos de varredura com deslizamento no sentido origem e inserção muscular, ficando estacionado por 1 a 2 minutos na região de gordura. Para esta etapa utilizar produto para deslizamento da ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)

- Seguir com Vacuum Laser com ventosa de vidro 30 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo
Ajustar Tempo: de 2 a 5 minutos de cada lado
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão de -30 a -60 mbar

Promover movimento de varredura com deslizamento no sentido do sistema linfático. Para esta etapa utilizar produto para deslizamento da ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação);

- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de Lifting de Papada conforme orientação do fabricante do produto.

8) Manchas

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
Aplicar produto específico à disfunção tratada;
- Aplicar o Vacuum Laser com ventosa de vidro 30 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP7 ou MP8
Ajustar Tempo: de 5 a 10 minutos Hemiface
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão de -90 até -150 mbar

Promover movimento de varredura com deslizamento no sentido do sistema linfático. Para esta etapa utilizar produto para deslizamento da ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação);

- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento de Manchas conforme orientação do fabricante do produto.

9) Olheira

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produto específico à disfunção tratada;
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa de vidro de 6 mm ou 12 mm

Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado

Ajustar: MP7 ou MP8

Ajustar Tempo: de 5 a 10 minutos de cada lado

Ajustar: Laser ON

Ajustar: em 660/808nm

Ajustar: em pressão de -30 até -90 mbar

Promover movimento de varredura com deslizamento no sentido do sistema linfático. Para esta etapa utilizar produto para deslizamento da ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação);

- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento de Olheiras conforme orientação do fabricante do produto.

10) Pós - Operatório Facial Tardio

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
Drenagem de Grupos linfáticos com Vacum Laser - ventosa vidro 30 mm,

Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado

Ajustar: MP5

Ajustar Tempo: conforme a necessidade

Ajustar: Laser ON

Ajustar: em 808nm

Ajustar: em pressão de até -60mbar

Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.

- Aplicar o Vacum Laser com ventosa de vidro 6mm ou 16mm

Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado

Ajustar: MP5

Ajustar Tempo: conforme a necessidade


Ajustar: Laser ON

Ajustar: em 808nm

Ajustar: em pressão de -30 até -90mbar

Promover movimentos de varredura realizando uma drenagem linfática. Neste caso, não é necessário utilizar produto para deslizamento da ventosa.

Sugestão para aplicação das ventosas:

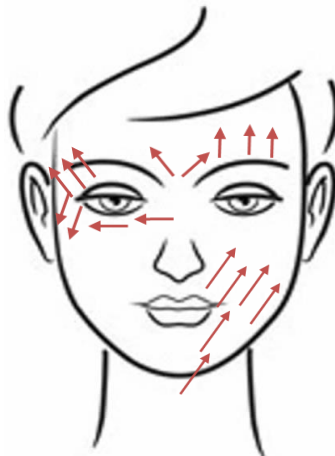

Observações Importantes:

- É imprescindível o uso de óculos de proteção profissional e cliente para devida proteção durante a emissão de laser.
- É necessário fazer a higienização das ventosas após cada utilização – detergente de ação antisséptica.
- A utilização dos produtos para deslizamento das ventosas deve ser de livre escolha do profissional – levando em consideração a disfunção a ser tratada, bem como a base do produto para que permita a ação da luz. Essa informação deve ser coletada com o fabricante do produto, que vai garantir o uso do produto em conjunto com a luz do laser.

VACUMLASER
VACUOTERAPIA COMBINADA COM LASER




11) Capilar - Ventosa de vidro

- Higienizar a região a ser tratada;
- Aplicar produto específico a disfunção tratada;
- Aplicar Vacum laser ventosa de vidro 6mm (bico chato ou reto)
Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão de -150 até -400 mbar
Aplicar de modo varredura suave em toda a região de queda ou calvície.
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento Capilar conforme orientação do fabricante do produto.

Sugestão como preparação para procedimento de microagulhamento.

12) Drenagem Linfática

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
Drenagem de Grupos linfáticos com Vacum Laser - ventosa acrílica 40 ou 60 mm,
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP7 ou MP8
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 808nm
Ajustar: em pressão de até -60mbar
Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.
- Aplicar produto para deslizar a ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa de acrílico 60 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP7 ou MP8
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão de -30 até -90mbar
Promover movimentos de varredura suaves, no sentido do sistema linfático..

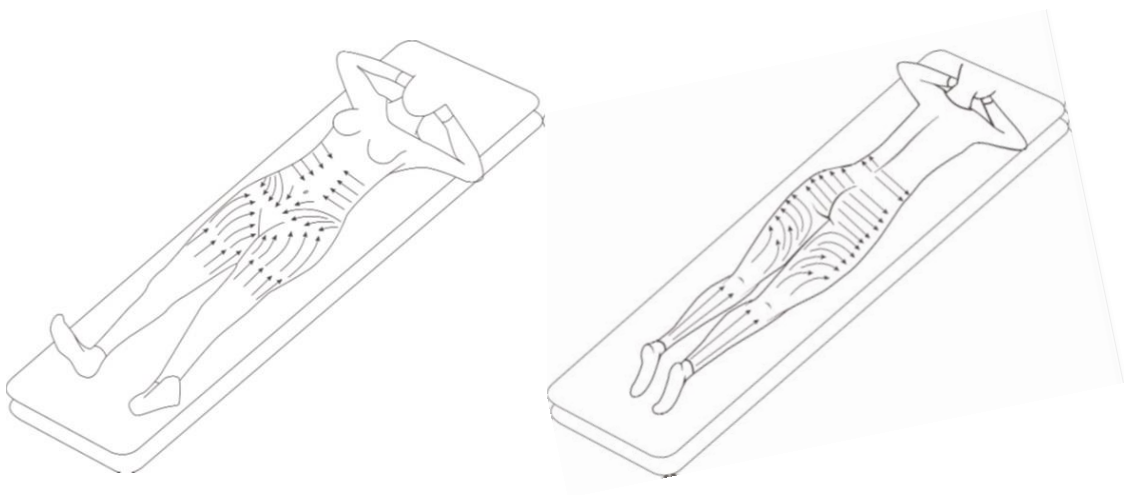

13) Celulite

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produtos para a disfunção tratada;
Opcional: Drenagem de Grupos linfáticos com Vacum Laser - ventosa acrílica 40 ou 60 mm,
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP7 ou MP8
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar Tempo: em 808nm
Ajustar: em pressão de até -60mbar
Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 60 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão de -90 até -150mbar
- Aplicar produto para deslizar a ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação) Promover movimentos de varredura, no sentido do sistema linfático, de forma suave e lenta.
- Seguir com protocolo com uso produtos adequados à técnica de tratamento para celulite conforme orientação do fabricante do produto.

14) Gordura Localizada – Membros inferiores

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produtos para a disfunção tratada;
Opcional: Drenagem de Grupos linfáticos com Vacum Laser - ventosa acrílica 40 ou 60 mm,
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP7 ou MP8
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 808nm
Ajustar: em pressão de até -60mbar
Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.

- Aplicar produto para deslizar a ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação) em seguida aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 60:
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP9
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão de -130 até -250mbar
- Aplicar de forma pontual de 1 a 2 minutos nas regiões já demarcadas anteriormente com acúmulo de gordura;
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Gordura Localizada conforme orientação do fabricante do produto.

15) Glúteos- Lifting imediato COM fototerapia

Protocolo sugerido COM Fototerapia- Um lado de cada vez.

- Higienização, esfoliação e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produtos para a disfunção tratada;
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 160 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP8
Ajustar Tempo: 10 minutos (cada Gluteo)
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660nm
Ajustar: pressão mínima
- Colocar a ventosa tracionando a musculatura para cima, com pressão apenas para manter a manopla acoplada na região;
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Lifting de Glúteos conforme orientação do fabricante do produto.

VACUOTERAPIA COMBINADA COM LASER


16) Glúteos- Lifting imediato SEM fototerapia

Protocolo sugerido SEM Fototerapia- os dois lados ao mesmo tempo

- Higienização, esfoliação e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produtos para a disfunção tratada;
- Para este procedimento será necessário a utilização do acessório mangueira com duas saídas.
- Aplicar o Vacum laser com ventosa acrílica 160 mm
- Glúteo flácido:
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP5
Ajustar tempo: de 6 a 10 minutos
Ajustar: Laser OFF
Ajustar: pressão mínima
- Glúteo rígido:
Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo
Ajustar Tempo: de 6 a 10 minutos
Ajustar: Laser OFF
Ajustar: pressão mínima
- Colocar a ventosa tracionando a musculatura para cima, com pressão apenas para manter a manopla acoplada;
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Lifting de Glúteos conforme orientação do fabricante do produto.

17) Gordura Localizada – Abdominal

- Higienização, esfoliação e tonificação de acordo com biotipo;
Opcional: Drenagem de Grupos linfáticos com Vacum Laser - ventosa acrílica 40 ou 60 mm,
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP7 ou MP8
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 808nm
Ajustar: em pressão de até -60mbar
Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.
- Aplicar produtos para a disfunção tratada;
- Aplicar produto para deslizar a ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)
- Nos pontos de maior volume de gordura
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 40 ou 60 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP9
Ajustar tempo: de 1 a 2 minutos
Ajustar: Laser ON
Ajustar: 660/808nm
Ajustar: pressão de -30 até -100 mbar
- Aplicar de forma pontual. Em toda a extensão do abdome
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 40 ou 60 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP9
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: 660/808nm
Ajustar: pressão de -90 até -150 mbar
- Promover movimento de varredura no sentido do sistema linfático
- Ao redor do umbigo, realize movimentos circulares no sentido do intestino durante 5 minutos, no mesmo modo e mesma pressão;
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Gordura Localizada Abdominal conforme orientação do fabricante do produto.

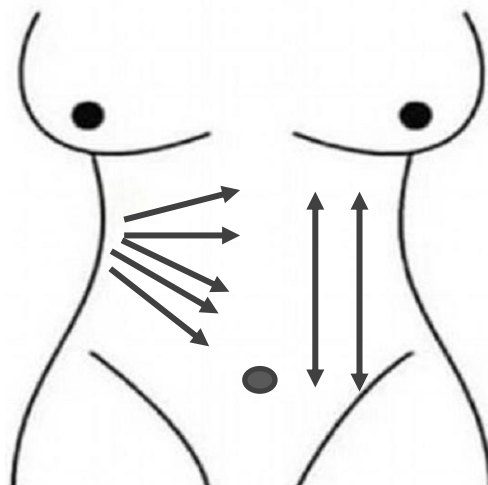

18) Gordura Localizada – Membros superiores- braço

- Higienização, esfoliação e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produtos para a disfunção tratada;
- Aplicar produto para deslizar a ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação).
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 40 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP9
Ajustar Tempo: de 1 a 2 minutos
Ajustar: Laser ON
Ajustar: 660/808nm
Ajustar: pressão de -60 até -150 mbar
Promover movimentos de forma pontual nos locais com acúmulo de gordura.
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Gordura Localizada no Braço conforme orientação do fabricante do produto.

Observação: diminuir a pressão de acordo com o grau de flacidez.

19) Lifting – Membros superiores - braço

- Higienização, esfoliação e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produtos para a disfunção tratada;
- Aplicar produto para deslizar a ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 40,
Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo
Ajustar: MP9
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: 660/808nm
Ajustar: pressão de -60 até -150 mbar
- Promover movimento de varredura no sentido do sistema linfático;
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Lifting no Braço conforme orientação do fabricante do produto.

Observação: diminuir a pressão de acordo com o grau de flacidez.

20) Lifting de Mama

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produtos para a disfunção tratada;
- Aplicar produto para deslizar a ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 40 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: 660/808nm
Ajustar: pressão de -30 até -70 mbar
- Promover movimento de varredura no sentido do sistema linfático;
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Lifting de Mama conforme orientação do fabricante do produto.

21) Lifting- Membros inferiores- coxa

- Higienização, esfoliação e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produtos para a disfunção tratada;
- Aplicar produto para deslizar a ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 60 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: 660/808nm
Ajustar: pressão de -60 até -150 mbar
- Promover movimento de varredura no sentido do sistema linfático;
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Lifting de Coxa conforme orientação do fabricante do produto.

Observação: diminuir a pressão de acordo com o grau de flacidez.

22) Lifting- abdômen

- Higienização, esfoliação e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produtos para a disfunção tratada;
- Aplicar produto para deslizar a ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 60 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: 660/808nm
Ajustar: pressão de -60 até -150 mbar
- Promover movimento de varredura no sentido do sistema linfático;
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Lifting de Abdômen conforme orientação do fabricante do produto.

Observação: diminuir a pressão de acordo com o grau de flacidez.

23) Estrias Albas (Utilizar as ventosas de vidro)

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
- Opcional: Esfoliação com Peeling Diamante;
- Aplicar produto específico à disfunção tratada;
- Aplicar o Vacum laser com ventosa de vidro 6 mm curvo ou 12 mm,
Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: 660/808nm
Ajustar: pressão de -250 até -400 mbar
- Promover movimento de varredura em toda a extensão da estria até obter hipervascularização intensa no local;
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Estrias conforme orientação do fabricante do produto.

24) Estrias Rubras (Utilizar as ventosa de vidro)

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
- Opcional: Esfoliação com Peeling Diamante;
- Aplicar produto específico à disfunção tratada;
- Aplicar o Vacum laser com ventosa de vidro 6 mm curvo ou 12 mm,
Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: 660/808nm
Ajustar: pressão de -100 até -250 mbar
- Promover movimento de varredura em toda a extensão da estria até obter hipervascularização moderada no local;
- Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Estrias conforme orientação do fabricante do produto.

25) Pós Operatório Corporal Tardio

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 60 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP7 ou MP8
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 808nm
Ajustar: em pressão de até -60mbar
Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica 60 mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP7 ou MP8
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 808nm
Ajustar: em pressão de -30 até -90mbar
- Realize os movimentos de uma drenagem linfática. Não é necessário utilizar produto para realizar a técnica de drenagem linfática com o Vacum Laser.

26) Estética Intima (Utilizar as ventosa de vidro)

- Higienização e tonificação da região (usar produtos adequados a região íntima)
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa vidro 12mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Pulsado
Ajustar: MP5
Ajustar Tempo: 1m
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão de até -60mbar
Aplicar a ventosa de modo pontual sobre a região de flacidez 1m por ponto.
- Aplicar o Vacum Laser com ventosa vidro 16mm
Parâmetros: Ajustar: Modo Continuo
Ajustar Tempo: conforme a necessidade
Ajustar: Laser ON
Ajustar: em 660/808nm
Ajustar: em pressão de -30 até -90mbar (observar sensibilidade e flacidez)

- Realize os movimentos suaves no sentido do sistema linfático, é necessário utilizar produto para melhor deslizamento da ventosa. Seguir com protocolo com uso de produtos adequados ao tratamento para região íntima conforme orientação do fabricante do produto

27) Massagem

- Higienização e tonificação de acordo com biotipo;
- Aplicar produto para deslizar a ventosa e conservar a penetração da luz; (O produto pode ser em base gel ou em base óleo vegetal e também pode conter ativos de acordo com a indicação)
- Aplicar o Vacuum Laser com ventosa acrílica 60 mm

Parâmetros: Ajustar: Modo Contínuo

Ajustar Tempo: conforme a necessidade

Ajustar: Laser ON

Ajustar: 660/808nm

Ajustar: pressão de -90 até -180 mbar

Promover movimento de varredura no sentido de origem e inserção muscular ou movimento de vai e vem alongando a musculatura;

Seguir com protocolo e o uso de produtos adequados à técnica de tratamento para Massagem conforme orientação do fabricante do produto

Orientações Importantes:

É imprescindível o uso de óculos de proteção para o profissional e cliente durante a emissão de laser;

A cada procedimento realizar:

- a troca do filtro (esponja)
- a higienização da ventosa acrílica com detergente neutro em água corrente, as ventosa de vidro na autoclave

