

RECOVER

laserterapia estética

Protocolos clínicos de acupuntura

Patologia	(Laser) λ	Potência	Energia	Modo de aplicação	Sessões
Acne	660nm	100 mW	6 a 7J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Melhora das cicatrizes residuais em 10 sessões.
Acroparestesia	808nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Sugestão de sessões diárias ou 3 sessões semanais.
Artrite dos dedos das mãos	808nm	100 mW	2 a 3J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 2 a 3J por área. Se houver edema ou má circulação aconselhamos a metade do tempo para o procedimento. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Sugestão de 10 a 20 sessões, começando pela área de maior dor.
Artrite e entorse do tornozelo.	808nm	100 mW	7 a 9J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 7 a 9J por área. Repetindo a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 10 sessões uma a cada dois dias. Melhora após a 4ª sessão.
Artrose 1º e 2º dedo	808nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Sugestão de 2 a 4 sessões por semana. A dor deverá apresentar melhora após a 1ª a 2ª sessão. A caneta deverá estar em posição perpendicular à área do tratamento.
Artrose cervical	808nm	100 mW	6 a 7J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 6 a 7J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Sugestão de sessões diárias ou 3 sessões semanais.
Artrose de joelho	808nm	100 mW	8 a 9J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 8 a 9J, por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Sugestão de sessões diárias ou 3 sessões semanais.
Artrose de ombro	808nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Sugestão de 20 sessões. A dor deverá melhorar após a 6ª sessão.
Artrose dorsal e lombar	808nm	100 mW	6 a 7J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 6 a 7J, por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Sugestão de sessões diárias ou 3 sessões semanais.
Artrose dos dedos das mãos	808nm	100 mW	2 a 3J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 2 a 3J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Sugestão de 6 a 12 sessões. O intervalo de aplicação é determinado pela dor. A dor deverá melhorar após a 4ª aplicação.
Cefaléia frontal	808nm	100 mW	6 e 7J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 6 a 7J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 12 sessões uma a cada dois dias. Após 30 dias repetir a série.
Ciatalgia	660nm	100 mW	2 a 3J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 2 a 3J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 15 sessões, uma a cada dois dias. Melhora após a 4ª sessão.
Edema pós - cirurgico	660nm	100 mW	5 a 6J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 5 a 6J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar sessões a cada dois dias.
Entorse de joelho	808nm	100 mW	8 a 10J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 8 a 10J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 10 sessões uma a cada dois dias. Melhora após a 4ª sessão.
Entorse e artrose do cotovelo	808nm	100 mW	8 a 10J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 8 a 10J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 10 sessões. Quando houver edema e imobilidade, diminuir o tempo para obter melhor efeito de bioestimulação. Duas primeiras semanas 3 aplicações. As duas semanas seguintes 2 aplicações.
Epicondilite (Tennis Elbow)	808nm	100 mW	8 a 10J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 8 a 10J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 20 sessões uma a cada dois dias. Melhora após a 7ª sessão. Aumentar progressivamente o intervalo de acordo com a volta da dor.
Enxaqueca	808nm	100 mW	6 a 7J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 6 a 7J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 15 sessões uma a cada dois dias. 30 minutos, no máximo ao dia. Melhora após a 5ª aplicação.
Herpes simples	660nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 4 a 5J, por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 10 sessões uma a cada dois dias. Melhora após a 5ª sessão.
Linfoedema braquial	660nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar sessões a cada dois dias.
Moléstia de Raynaud	808nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Sugestão de 2 a 3 sessões por semana. Melhora após a 4ª sessão. A melhora da sensação de frio será verificada após a 12ª sessão.
Nevralgia do trigêmeo	660nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 10 sessões, uma a cada dois dias.
Nevralgia intercostal	660nm	100 mW	8 a 10J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 8 a 10J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 10 sessões, uma a cada dois dias. Melhora após a 4ª sessão.
Periartrite escapulo umeral	808nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Sugestão de sessões diárias ou 3 sessões semanais.
Pré - operatório	660nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar sessões a cada dois dias.
Pós - operatório	660nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar sessões a cada dois dias.
Queimaduras	660nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar sessões a cada dois dias.
Rinite vaso-motora	808nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 10 sessões uma a cada dois dias. Melhora após a 4ª sessão. Pode-se irradiar também o interior das conchas nasais, por 1 minuto. Melhora após a 1ª sessão.
Talalgia	808nm	100 mW	8 a 10J	Realizar aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 8 a 10J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 10 sessões uma a cada dois dias. Melhora após a 2ª sessão.
Tendinite no tendão de aquiles	808nm	100 mW	8 a 9J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 8 a 9J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 10 sessões uma a cada dois dias. Melhora após a 4ª sessão.
Torcicolo	660nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 4 a 5J, por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 12 sessões uma a cada dois dias. Melhora após a 4ª sessão.
Úlcera Varicosa	660nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar sessões a cada dois dias.
Vertigem	660nm	100 mW	4 a 5J	Realizar a aplicação pontual nas áreas indicadas no protocolo. Aplicar de 4 a 5J por área. Repetir a energia 03 vezes em cada ponto.	Realizar 10 sessões uma a cada dois dias. Melhora após a 2ª sessão.